



Lisaleht drenaažisüsteemi multiEffluent Emptying System kasutamise kohta koos seadmetega multiFiltrate/multiFiltratePRO

Väljaanne: 02A-2022
Väljaandmise kuupäev: 2022-07
Osa nr: F50009119

See lisaleht sisaldab lisainfot drenaažisüsteemi multiEffluent Emptying System kasutamise kohta seadmetega multiFiltrate/multiFiltratePRO.

Lisalehel on juhised operaatorile, et tagada drenaažisüsteemi multiEffluent Emptying System turvaline kasutamine koos seadmetega multiFiltrate/multiFiltratePRO.

Sellest lisalehest sõltumatult tuleb seadmete multiFiltrate/multiFiltratePRO ja muude ravis kasutatavate toodete kasutamisel järgida vastavaid kasutusjuhendeid ning eelkõige nendes sisalduvaid hoiatusi ja ettevaatusabinõusid.

Drenaažisüsteemi multiEffluent Emptying System kasutamisel ei kehti piiranguid tarkvaraversioonile.

Drenaažisüsteemi multiEffluent Emptying System kasutatavus

Drenaažisüsteemi multiEffluent Emptying System ei tohi kasutada, kui esineb mõni alljärgnevalt loetletud tingimustest.

- Drenaažisüsteem multiEffluent Emptying System on kahjustatud.

Materjal	Eesmärk	Omandus või väärtus
multiEffluent Drain Line	Ühendab filtraadikoti ja drenaaži.	Kulumaterjal
multiEffluent Pump	Edastab filtraadi filtraadikotist drenaaži.	Akutoitel

Varuosad

Kasutage ainult tootja poolt heaks kiidetud varuosi. Varuosade, testimisseadmete ja tööriistade leidmiseks ning tellimiseks kasutage alati elektroonilist varuosade kataloogi.

Drenaažisüsteemile multiEffluent Emptying System on saadaval järgmised varuosad:

- aku
- laadimisalus koos kaabliga
- laadimisaluse toiteplokk

◆ Lisainfo multiFiltrate/multiFiltratePRO kasutusjuhendi kohta 4. peatükk „Kasutamine“



Märkus


Juhendis on info drenaažisüsteemi multiEffluent Emptying System ühendamise kohta. Kui seadistamise ajal ilmneb, et ekraanikuva ja käesolev juhend on erinevad, tuleb järgida juhendit.

Juhendis kirjeldatakse seadistamist multiFiltratePRO näitel. Seadme multiFiltrate puhul on toimingud samad.

Drenaažitoru on ette nähtud ühekordseks kasutamiseks (üks ravi).

Maksimaalne patsiendil kasutamise aeg on 72 tundi.

Drenaažisüsteemi multiEffluent Emptying System ülevaade

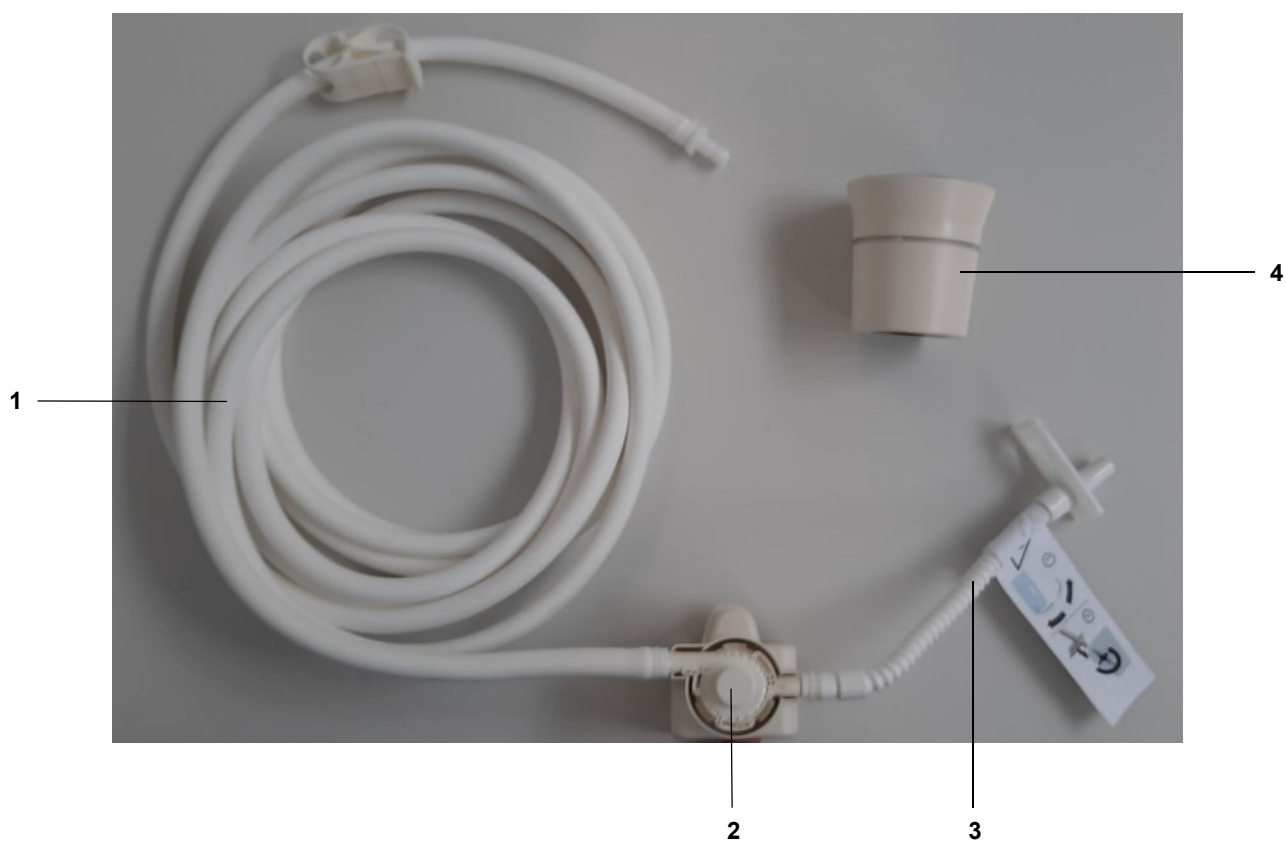

Legend

- 1 Drenaažitoru (pikk voolik)
- 2 Pumbapea
- 3 Drenaažitoru (lühike voolik koos ohutussildiga)
- 4 Pumba aiam

1. Seadme tööks valmis seadmine



Seadme tööks valmis seadmisel pidage silmas järgmist.

- Kontrollige pumba ajami laetust, kui see vilgub punaselt, laadige umbes 1,5 tundi.

Punane > pumba ajami aku on tühi

Kollane > pumba ajami aku on peaaegu tühi

Roheline > pumba ajami aku on laetud

2. Ettevalmistus



-
- Võtke drenaažitoru pakendist välja.

multiFiltrate



- Kinnitage hoidik koos pumbapeaga seadme külge.
- Kinnitage dreanaažitoru (pikk voolik) sobiva äravooluava külge.

multiFiltratePRO




3. Valikuline: ühendamine meediumitoitemooduliga Fresenius Medical Care MediaR



- Ühendage MediaR meediumitoitemooduliga või muu meediumitoitemooduli drenaažitoruga.

4. Tühjendamine ravi ajal

multiFiltrate

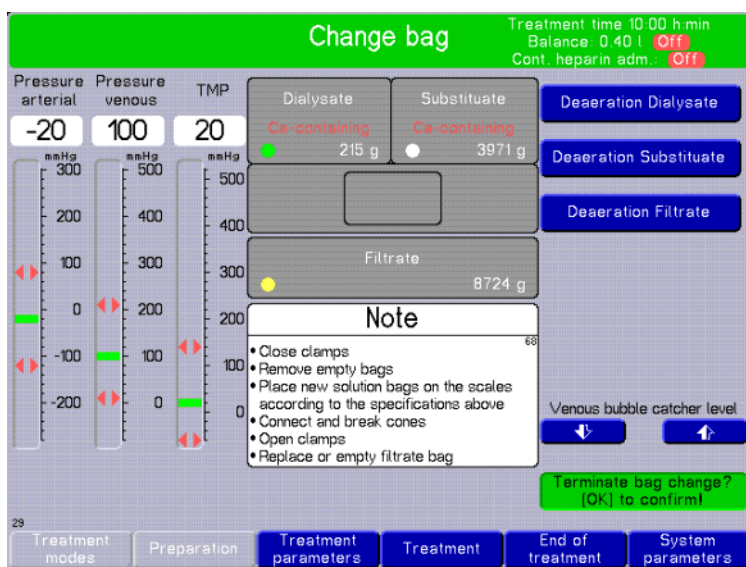

- Valige menüüsuvand **Change bag/Koti vahetus** ja alustage kottide vahetamist.

multiFiltratePRO





Hoiatus

Elektrišoki tõttu tekkivate vigastuste oht

Drenaažsüsteemi multiEffluent Emptying System kasutamise tagajärjel võib suureneda patsiendi lekkevool. Selle vältimiseks pidage kinni järgmistest tingimustest.

- Filtraadikott tuleb lahutada filtraadijuhtme küljest enne, kui avate filtraadikoti äravooluklapi.
 - Pärast filtraadikoti tühjendamist tuleb drenaažisüsteem multiEffluent Emptying System filtraadikoti küljest lahti ühendada.
-

4.1 Filtraadijuhtme sulgemine ja lahutamine



-
- Sulgege filtraadijuhtme ja filtraadikoti klambrid.



-
- Lahutage filtraadijuhe filtraadikoti küljest.



- Ühendage drenaažitoru (lühike voolik) filtraadikoti ava külge.



- Avage sulgeklamber ja äravooluklapp. Pumbapea täitub automaatselt vedelikuga.



- Aktiveerige pumba ajam, liigutage pumba ajamit integreeritud liikumisanduri aktiveerimiseks (LED-rõngas süttib roheliselt).
- Kinnitage pumba ajam pumbapea külge. Filtraadikott hakkab automaatselt tühjenema (LED-rõnga välimine äär süttib siniselt).



- Oodake umbes 1 minut.

Koti tühjenemine peatub automaatselt, kui pumbapeas tuvastatakse õhk (LED-rõngas vilgub siniselt).



- Eemaldage pumba aiam, tõmmates seda otse üles.



- Sulgege sulgeklamber ja äravooluklapp.




-
- Ühendage dreanaažitoru (lühike voolik) filtraadikoti äravooluklapi küljest lahti.



-
- Ühendage filtraadijuhe filtraadikotiga ja avage klambrid.

4.2 Koti vahetuse lõpetamine

multiFiltrate

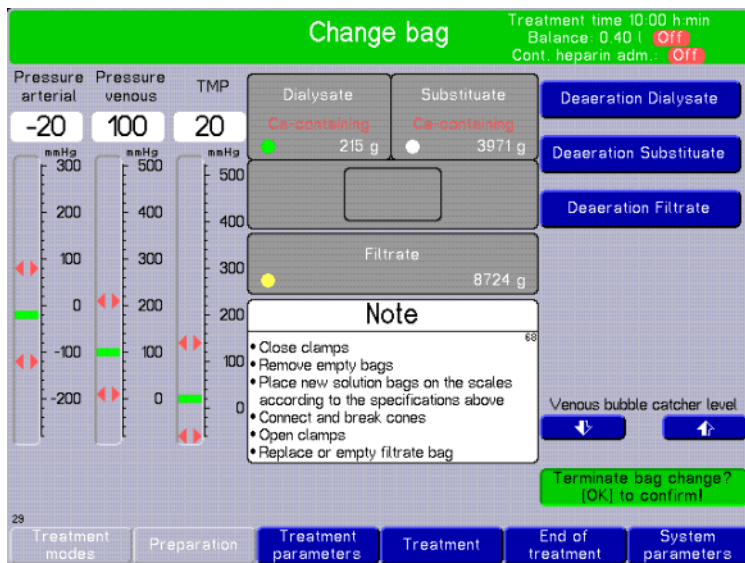

➤ Lõpetage koti vahetus.

multiFiltratePRO



➤ Asetage pumba ajam laadimisalusel.

5. Ravi lõpetamine ja koti lõplik tühendamise

multiFiltrate



multiFiltratePRO



-
- Ravi lõpus tühendage filtraadikott, nagu kirjeldatud alates peatükist 4.1.


-
- Eemaldage seadmelt multiFiltrate hoidik koos pumbapeaga, tõmmates seda vertikaalselt üles.

-
- Suruge seadme multiFiltratePRO korpust kergelt ja eemaldage hoidik koos pumbapeaga noole suunas.

-
- Kõrvaldage drenaažitoru kohalike eeskirjade kohaselt.


6. Hooldus ja veaotsing

6.1 Aku vahetamine

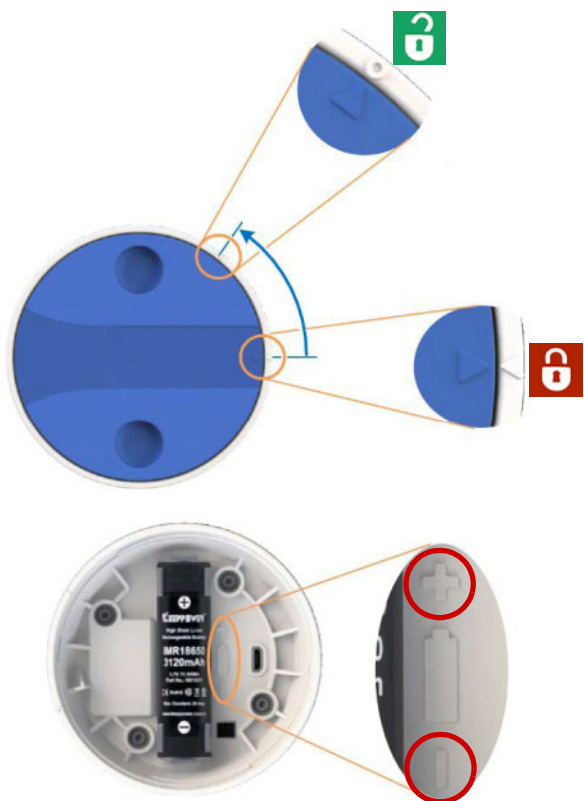

- Kasutage ainult selliseid akusid, mida Fresenius varuosadena pakub. Muidu ei pruugi pumba ajam korrektselt töötada või võib kahjustada saada. Teistsuguste akude kasutamine võib põhjustada inimeste vigastusi või suurendada tuleohtu.
- Aku sisestamisel pumba ajamisse jälgige poolusi (punased ringid).

6.2 Veaotsing

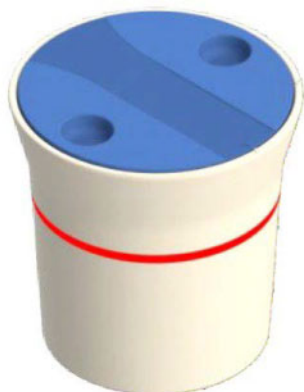

Vigadest annab märku punaselt vilkuv LED-rõngas.

Vigade loend

1. Aku temperatuur on liiga kõrge
 - Oodake, kuni aku on jahtunud normaalsele temperatuurile (LED ei vilgu enam punaselt).
2. Aku laetus on madal
 - Asetage pumba ajam laadimisalusele.
3. Pumba ajam ei reageeri
 - Veenduge, et pumba ajam aktiveeriti liigutusega enne kasutamist.
 - Kontrollige, kas aku on pumba ajamisse õigesti paigaldatud (kontrollige poolusi).
 - Asetage pumba ajam laadimisalusele.